

# StrataXRT®

per la prevenzione e il trattamento della radiodermatite

**StrataXRT® è un'innovativa medicazione ad azione filmogena progettata specificamente per la prevenzione ed il trattamento delle dermatiti da radiazioni.**

StrataXRT® è utilizzata per dare sollievo da infiammazioni di grado moderato come secchezza, prurito, desquamazione, screpolature ed irritazioni della pelle.

Per infiammazioni di grado più severo, StrataXRT® riduce dolore, arrossamenti, calore ed aiuta a lenire le aree esposte della pelle.

**Visita il sito web di StrataXRT® per avere maggiori informazioni sul prodotto:**

[www.strataxrt.it](http://www.strataxrt.it)



CE Class IIa Medical Device  
FDA Listed / TGA Registered

Attenzione: Esclusivamente per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. StrataXRT® non deve essere applicata sopra medicazioni topiche se non su consiglio del medico. StrataXRT® può macchiare i tessuti se non è completamente asciutta. In caso di macchie, un lavaggio a secco dovrebbe efficacemente rimuovere il prodotto senza danneggiare i tessuti. In caso la dermatite mostri segni di infezione o comunque nessun miglioramento - giorni dopo la prima applicazione, consultare il medico. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico. Non adatta per il trattamento di dermatiti altamente essudative, ferite con tunnelling o ustioni di terzo grado. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare dopo la data di scadenza (EXP) indicata sulla confezione. La data di scadenza (EXP) non cambia una volta aperto il tubetto. Non utilizzare qualora il tubetto presenti danni visibili. Per una corretta conservazione, richiudere il tubetto stringendo bene il tappo. Sterile fino alla prima apertura. Ingredienti: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones.




**Manufactured by:**  
Stratpharma AG  
Aeschenvorstadt 57  
CH-4051 Basel  
Switzerland

References  
1. Porock, Kristjanson. Eur J Cancer Care (Engl). 1999;8(3):143-153  
2. Kedge E. Radiography. 2009;15(3):247-257


Stratpharma  
Switzerland

CV-ML-003-0418


## Come si applica?

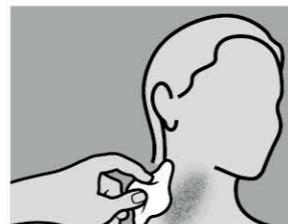


1. Assicurarsi che l'area interessata sia pulita ed asciutta. Tamponare delicatamente l'eventuale essudazione, per quanto possibile, prima di procedere con l'applicazione del gel.

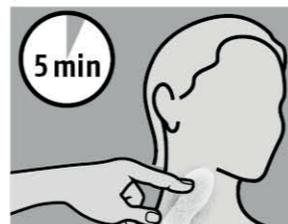

2. Applicare uno strato molto sottile di StrataXRT® direttamente sull'area interessata e lasciare asciugare. Impiegherà circa 5 o 6 minuti.

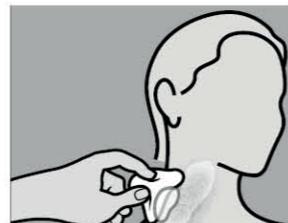

3. Se il gel impiega più tempo per asciugare, significa che ne è stata applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente l'eccesso con una salvietta o una garza pulita ed attendere che il prodotto si asciughi.

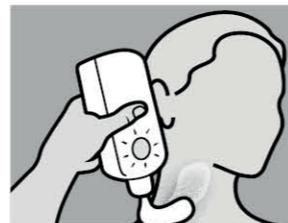

4. Una volta asciutta, StrataXRT® può essere coperta da protezioni solari, trucco e vestiti.

## Per quanto tempo applicarla?

L'applicazione di StrataXRT® è consigliata a seguito della prima seduta di radioterapia e per un periodo di 60-90 giorni (24 ore al giorno / 7 giorni a settimana / due volte al giorno) dopo la fine del ciclo di terapia, o fino a quando non sia più possibile riscontrare ulteriori progressi. Per le dermatiti croniche da radiazione, l'utilizzo è raccomandato fino a che non sia più possibile riscontrare ulteriori progressi.

L'utilizzo di StrataXRT® è raccomandato fin dalla prima seduta del ciclo di radioterapia.

## Suggerimenti per l'uso.

StrataXRT® può essere conservata in frigorifero prima dell'applicazione, per un sollievo immediato dalla sensazione di bruciore che può derivare dalla seduta di radioterapia.

StrataXRT® può macchiare i tessuti se non è completamente asciutta. Un normale lavaggio non sarà sufficiente per rimuovere completamente il prodotto dal tessuto. In caso restino delle macchie, un lavaggio a secco dovrebbe essere efficace senza danneggiare i capi macchiati.

StrataXRT® può anche essere utilizzata insieme ad altri trattamenti per ottenere risultati migliori.

StrataXRT® può essere utilizzata con o senza un ulteriore bendaggio protettivo.

È possibile aumentare la frequenza di applicazione di StrataXRT® per ottenere sollievo da prurito o altri sintomi.

## Che quantità applicare?

Il gel StrataXRT® ha una formulazione unica che permette di utilizzare una quantità molto inferiore di prodotto rispetto alle normali creme idratanti o ad altri unguenti protettivi, poiché si asciuga formando un film protettivo flessibile.

Un tubetto da 20g è sufficiente per trattare un'area di 12x15 cm due volte al giorno, per più di 30 giorni.

Un tubetto da 50 g è sufficiente per trattare un'area di 12x15 cm due volte al giorno, per più di 75 giorni.

StrataXRT® non viene assorbita dalla pelle, ma si asciuga formando uno strato finissimo, ancora più sottile di un foglio di carta.

# StrataXRT®

per la prevenzione e il trattamento della radiodermatite

**L'innovativa crema contro la dermatite da radiazioni che ti proteggerà durante il tuo ciclo di radioterapia.**



Richiedi al tuo medico radioterapista il coupon sconto per l'acquisto di StrataXRT® su [www.strataxrt.it](http://www.strataxrt.it)

Stratpharma  
Switzerland

## Che cos'è la dermatite da radiazioni?

Insieme al tuo medico hai deciso di intraprendere un percorso di radioterapia. La radioterapia utilizza alte dosi di radiazioni per distruggere le cellule tumorali a crescita veloce (per esempio per ridurre le dimensioni di un tumore).

Tuttavia le radiazioni che distruggono le cellule cancerogene danneggiano anche le cellule sane ad esse vicine, come per esempio lo strato basale della pelle, che ha una crescita veloce. Per questo motivo, potresti riscontrare alcuni effetti collaterali sulla pelle, come la dermatite da radiazioni.

Questa brochure ti aiuterà a capire e gestire questi effetti collaterali prima che possano apparire.

- La dermatite da radiazioni è diversa dalle bruciature. Il danno avviene negli strati più profondi della tua pelle.
- Il danno sarà visibile sulla tua pelle all'incirca 10-14 giorni dopo la prima seduta di radioterapia, poiché questo è il tempo che occorre alle cellule danneggiate per migrare sulla superficie della pelle.
- Se le nuove cellule sono prodotte più velocemente di quanto le vecchie cellule vengano ricambiate, la tua pelle diventerà secca e squamosa (desquamazione secca).
- Mano a mano che si procede con la radioterapia, la tua pelle potrebbe non essere in grado di produrre nuove cellule sufficienti a rimpiazzare quelle vecchie, e gli strati di pelle più superficiali potrebbero apparire danneggiati e trasudare fluidi (desquamazione umida). (1)
- La gravità delle reazioni della pelle potrebbe continuare ad aumentare per (2) settimane, anche dopo che il ciclo di radioterapia sarà concluso, fino a che le cellule nuove della pelle avranno sostituito quelle danneggiate. (2)

## Proteggi la tua pelle! Richiedi al tuo medico il coupon sconto per l'acquisto di StrataXRT® su [www.strataxrt.it](http://www.strataxrt.it).



*"Alcune persone nel mio gruppo di supporto per i tumori hanno la pelle secca ed irritata. Quando anche la mia pelle ha iniziato a procurarmi fastidio, gli infermieri mi hanno spiegato come prendermi cura dell'area in trattamento. E ovviamente ho provveduto a coprire la pelle quando uscivo, anche se stavo fuori solo per pochi minuti."*

- Assicurati che i tuoi vestiti coprano l'area in trattamento quando sei all'esterno.
- Indossa abiti larghi.
- Scegli vestiti e lenzuola fatti di stoffe morbide.
- Evita il contatto diretto con il sole; per offrire la massima protezione, sarebbe necessario utilizzare protezione solare.
- Utilizza saponi e prodotti per la cura della persona che siano neutri e non profumati.
- Utilizza acqua tiepida e non calda per bagni e docce.
- Tampona delicatamente la tua pelle dopo aver fatto

- bagno o doccia. Evita di nuotare in acqua con cloro, poiché potrebbe seccare la pelle.
- Non cancellare i segni con cui i medici marcano la tua pelle. Servono per indicare le aree in cui dirigere le radiazioni.
- Non applicare nulla di troppo caldo né troppo freddo sulle aree sottoposte alle radiazioni.
- Utilizza un rasoio elettrico se il medico o gli infermieri confermano che ti sarà possibile raderti.
- Non raderti con la pelle bagnata, e non utilizzare prodotti per la rimozione dei peli.

Chiedi al tuo medico prima di utilizzare qualsiasi altro prodotto sulla tua pelle.

Ricorda che i prodotti di uso comune per la cura della persona, i cosmetici e i deodoranti possono essere controindicati in caso di dermatiti da radiazioni.

Riferisci al tuo medico se, nell'area interessata dal trattamento radioterapico, noti cambiamenti a livello cutaneo.

## StrataXRT® – un aiuto durante il tuo percorso di radioterapia.



**StrataXRT® è un'innovativa medicazione ad azione filmogena progettata specificamente per la prevenzione ed il trattamento delle dermatiti da radiazioni.**

- StrataXRT® è stata sviluppata per essere spalmata facilmente con una minima quantità di prodotto.
- StrataXRT® è batteriostatica, gas permeabile, impermeabile all'acqua ed inerte.

**StrataXRT® si asciuga formando uno strato protettivo sottilissimo e flessibile che permette alla pelle affetta da dermatite da radiazioni di:**

- Mantenere lo strato acido della pelle poiché StrataXRT® ha un valore di pH neutro.
- Minimizzare la perdita di acqua transepidermica e quindi preservare l'idratazione naturale della pelle.
- Migliorare il comfort.
- Ridurre la risposta infiammatoria acuta della pelle.
- Dare sollievo alle infiammazioni di grado moderato, come secchezza, prurito, desquamazione e screpolature.
- Proteggere la pelle da traumi e frizioni.
- Promuovere un ambiente umido per la guarigione delle lesioni nello stadio di danneggiamento della pelle.
- Minimizzare il progredire delle reazioni della pelle durante il ciclo di radioterapia.